


## Konserwator końcówek STATMATIC

Czy systematycznie czyszczysz i konserwujesz swoje kątnice i prostnice ?

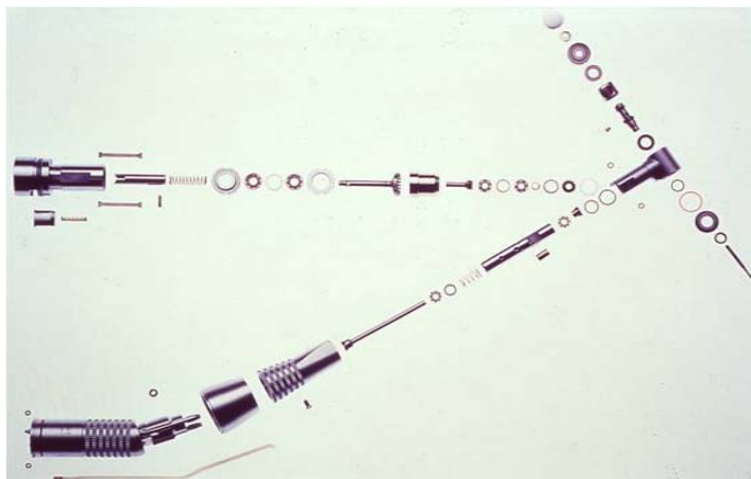

Ponad 50% awarii końcówek stomatologicznych spowodowanych jest przez zanieczyszczenia, które zbierają się na ich wewnętrznych mechanizmach oraz z braku odpowiedniego smarowania. Prosty zabieg czyszczenia i konserwacji zdecydowanie przedłuża żywotność każdej kątnicy i prostnicy, co w sposób wymierny przekłada się na obciążenie finansowe każdej praktyki dentystycznej.



Ręczne smarowanie końcówek objawia się najczęściej wyciekami oleju serwisowego. Po procesie sterylizacji końcówek tak zabezpieczonych nie pozostaje w nich wiele oleju, co powoduje częste awarie. Czy zatem ręczna konserwacja jest tania ?

Przez lata przekonaliśmy się, że każdy z dentystów ma na to pytanie swoją, dobrze uzasadnioną odpowiedź. Nie będziemy zatem próbować Państwa przekonywać do naszych teorii. Jesteście zawodowcami i doskonale wiecie co jest dla Was najlepsze.

Chcielibyśmy tylko przedstawić ciekawe i bardzo funkcjonalne urządzenie, które w sposób zdecydowany przedłuży żywotność używanych przez Państwa kątnic i prostnic. Bedzie dla nas sukcesem jeżeli treść poniższego tekstu okaże się na tyle ciekawa abyście Państwo zdołali dobrać do jego końca.




#### **STATMATIC – automatyczny konserwator końcówek stomatologicznych.**

- automatyczne czyszczenie i konserwacja od jednej do trzech końcówek stomatologicznych,
- całkowity czas cyklu dla każdej końcówki - 15s
- automatyczna detekcja podłączonej końcówki,
- opcjonalne adaptory do turbin na szybkozłączkę NSK, KaVo, Bien Air, W&H, Midwest,
- unikalny system ochrony końcówek (CM Care),
- chemicznie i fizycznie czyszczenie przy użyciu bezpiecznego środka konserwującego w postaci piany,
- optymalne pokrycie elementów końcówki substancją konserwującą,
- usuwanie nadmiar środka konserwującego za pomocą skompresowanego powietrza,
- łatwa wymiana spray-u,
- łatwa obsługa za pomocą jednego przyciśnięcia przycisku,
- nowoczesny i efektowny wygląd,

### **Automatyczne czyszczenie i konserwacja od jednej do trzech końcówek stomatologicznych.**

W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań w STATMATIC możemy czyścić i konserwować zarówno jedną końcówkę jak również dwie lub trzy. STATMATIC zawsze dopasuje się do naszych potrzeb. Czas potrzebny do wyczyszczenia i konserwacji jednej końcówki, to 15s. Już po 45s otrzymujemy zatem trzy wyczyszczone i zakonserwowane końcówki, gotowe do zapakowania i sterylizacji.

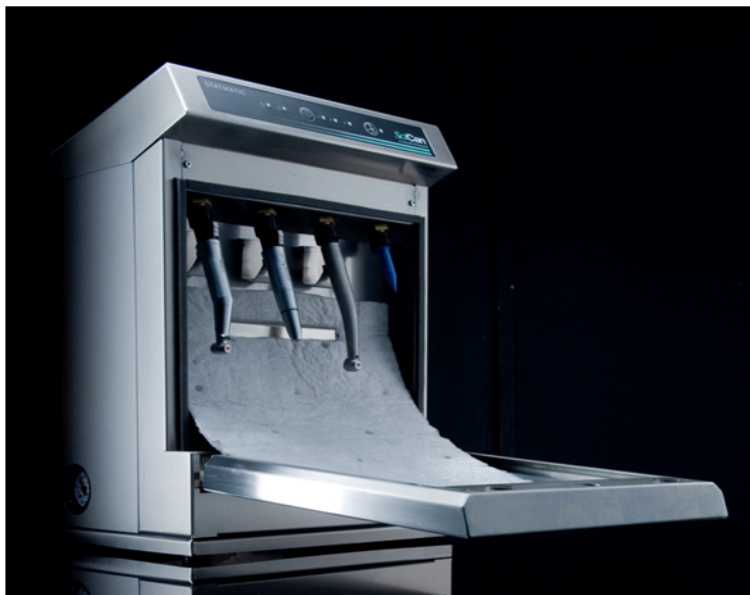


### **Chemicznie i fizycznie czyszczenie przy użyciu bezpiecznego środka konserwującego w postaci piany.**

Środkiem czyszczącym i jednocześnie konserwującym końcówki jest specjalnie skomponowany przez firmę SciCan spray. Specyfik w postaci piany podawany jest pod ciśnieniem do końcówki wnikając głęboko w jej elementy konstrukcyjne.



Specjalna, przezroczysta obudowa pokazuje wypełnienie końcówki przez pianę czyszczącą.

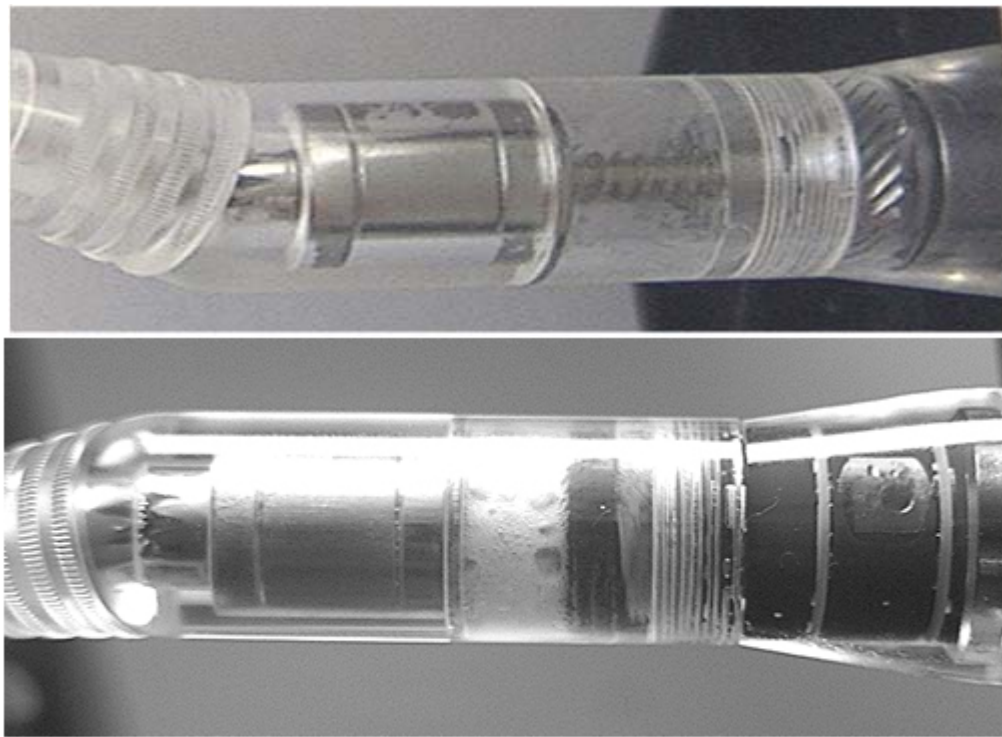

Czyszczenie i konserwacja jest bardzo skuteczna. Nadmiar środka oraz zanieczyszczenia usuwane są z końcówki za pomocą powietrza.

Łatwa konserwacja mechanizmu główki.



Łatwa wymiana sprayu czyszcząco-konserwującego.



## DANE TECHNICZNE

Producent:	SciCan
Kraj:	Niemcy
Gwarancja bazowa:	36 miesięcy
Certyfikat:	CE
Wydajność sprayu:	300 konserwacji
Ilość czyszczonych końcówek:	1-3
Wymiary zewnętrzne (gł/szer/wys):	19 cm/29 cm/40 cm
Waga:	8,6 kg
Głośność pracy:	60 dB
Ciśnienie powietrza:	4-6 bar
Zapotrzebowanie na powietrze:	40 NI/min
Zasilanie:	208-240V

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach firmy SciCan oraz wiele materiałów video i porównań.

**[www.scican.autoklaw.pl](http://www.scican.autoklaw.pl)**